

TECH LIFT M4

Återställning

För att aktivera återställningen, vrid ratten medurs (se bild 1) och håll den intryckt i ca 10 sekunder, hissen startar och går långsamt nedåt (lampa fail tänds) OBS! Med denna nedåtgående rörelse är klämskydd inte aktiverat, var extra försiktig och se till att inga hinder finns under plattformen). Håll vredet under hela liftens nedåtgående rörelse och släpp den bara när lampan (fail se bild 2) har slocknat och hissen är i botten.



Bild 1

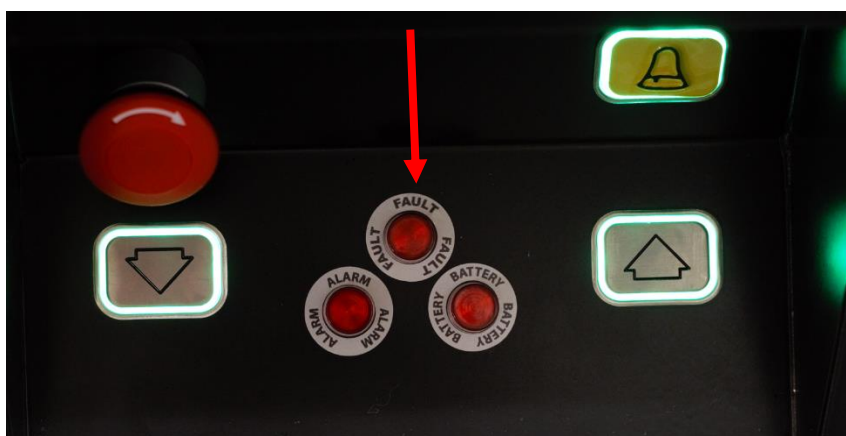


Bild 2

TECHLINE
SWEDEN AB

Tech Line Sweden AB

Kyrkbacken 2
SE-507 90 Brämhult
Mejl: info@techline.nu
Telefon: +46 (0)723 735506 or +46 (0)709 837972
Hemsida: www.techline.nu
Org-nr: 5592480585