

Instruktionsmanual

Tech Lift 500




Tech Line Sweden AB
www.techline.nu

Användarmanual för Tech Lift 500

Kontrollpanel

Lyftplattformen styrs med en kontrollpanel. Lyftplattformen är gjord för att vara enkel att använda även utan förkunskaper.

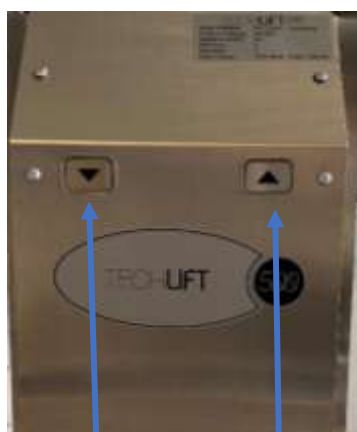

1

2



3

4

1. Ner
2. Upp
3. Nödstopp
4. Överbelastning

Tryck och håll ned knapp 2 för att höja lyften, rampen fälls upp för att förhindra avrinning.

Tryck och håll ned knapp 1 för att sänka hissen.

Vid nödfall trycker du på nödstoppet, knapp 3. För att frigöra nödstoppet, vrid knappen medurs.

Om hissen är överbelastad lyser lampan vid 4.

Detta är samma sak när det körs på batteri.

Livstid och service

Livslängden baseras på korrekt användning, rengöring och underhåll, samt årlig inspektion och underhåll av kvalificerad personal eller servicepersonal från din distributör.

Vid slutet av perioden måste Tech Lift 500 utvärderas av kvalificerad personal för att fastställa framtida användning. Reservdelar och ritningar kan beställas från tillverkaren eller distributören.

Rengöring

Tech Lift 500 rengörs med en svamp eller borste och tvålatten. Tech Lift 500 kan rengöras eller sköljas under normalt vattentryck men får inte tvättas med högtryckstvätt. Använd aldrig syror, baser eller lösningsmedel vid rengöring.

Vilket underhåll krävs av ägaren?

Normal rengöring.

Att det hålls rent runt plattformen, så att driften inte störs av konstiga ämnen.

Tekniska specifikationer

Yttermått (L x B)	1429 x 1050 mm
Innermått (L x B)	1250 x 800 mm
Lyfthöjd	30 till 500 mm
Vikt	51 kg
Max belastning	250 kg
Lyfthastighet	max 30 mm/sek
Elanslutning	230V
Strömförbrukning i standby	0,3 W
Strömförbrukning i drift	200 VA / 24V
Säkring	10A
Ljudnivå	52 dB (A)
Tätningssklass Lyftplattformskomponenter	IP 65

Tillverkas i enlighet med:

- 2006/42/EG av 17 maj 2006 – Maskindirektivet
- 2004/108/EF av 15 december 2004 – EMC – Direktiv
- 2004/EF av 12 december 2006 – Lågspänningsdirektivet

Och i enlighet med relevanta krav för:

- EN-81-41 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar. Specialhissar för transporter och personer och gods - Del 41: Vertikala plattformshissar avsedda för personer med nedsatt rörlighet.

Kontakta din distributör för service eller frågor om underhåll.